



# CONSIGNES DE REALISATION ET D'ENVOI DES PRELEVEMENTS CONSTITUTIONNELS ET SOMATIQUES (METROPOLE) - AURAGEN FILIERE CANCER

## 1 PRELEVEMENTS

### 1.1 Prélèvement constitutionnel

1 prélèvement de sang dans *un* tube en plastique en présence d'EDTA (bouchon violet) **non périmé** pour le patient.

- Pour les adultes : 2 ml minimum
- Pour les enfants de 6 mois à 15 ans : 1 ml minimum
- Pour les enfants de moins de 6 mois : 0,5 ml minimum



Par exemple :

- Tube EDTA 13X75 4ml (BD REF 367861 ou BD REF 367862)
- Tube EDTA 13X75 2ml (BD REF 367241)

***Dans le cadre de la politique d'épargne sanguine, merci de prélever 1 seul tube.***

### 1.2 Prélèvement somatique

1 **fragment de tissu tumoral** congelé (taille du fragment supérieure à 5 mm<sup>3</sup>) dans un cryotube.



**Le tissu tumoral envoyé pour AURAGEN doit être un prélèvement différent de celui conservé à visée sanitaire.**

## 2 IDENTIFICATION DES PRELEVEMENTS

### 2.1 Etiquetage des tubes

#### • Option 1 :

Utilisez vos propres étiquettes pour identifier les tubes de prélèvements  
Collez-en un exemplaire à l'emplacement prévu à cet effet sur la feuille de transfert.

#### • Option 2 :

Utilisez la planche d'étiquettes éditable depuis le formulaire de prescription sur HYGEN (<https://hygen.auragen.fr>).



## 2.2 Traçabilité de l'envoi

Compléter le bordereau d'expédition (voir Annexe 1). Joindre une copie de celui-ci dans le colis et conserver l'original dans votre service.

## 3 CONSERVATION

Sang : Au congélateur -20°C ou -80°C dans l'attente du regroupement avec le prélèvement somatique en provenance du laboratoire d'anatomopathologie. **Le tube de sang doit être directement congelé après le prélèvement.**

Stockage des prélèvements (Sang et tissu) avant envoi vers le laboratoire de qualification (INCa) : Au congélateur -80°C dans l'attente de la carboglace d'expédition.

**Les échantillons doivent nous être acheminés rapidement et ensemble.**

## 4 PREPARATION DE L'EXPEDITION

- Insertion du tube de sang et du tube de tissu tumoral ensemble dans un sac Diagnobag taille A5 homologué UN3373 **muni d'un adsorbant interne** (à fournir par vos soins).



- Rangement du ou des sacs Diagnobag dans une poolbox de **8 litres minimum de carboglace fournie par Starservice Healthcare** lors de l'enlèvement.
- Insertion de la lame HES FFPE dans une boîte de lames ou dans une enveloppe à bulle.

Le retour des lames HES FFPE se fera sur demande du prescripteur auprès de la plateforme INCa.

- Rangement de celle-ci au-dessus de la boîte fermée contenant la carboglace et le carton, avant sa fermeture.
- Rangement d'une copie du bordereau d'expédition (Annexe 1) des feuilles de transfert, du consentement et du compte rendu anatomopathologique au-dessus de la boîte fermée contenant la carboglace et le carton, avant sa fermeture.
- Fermeture de la poolbox lorsque le remplissage du colis est terminé et prêt à l'envoi.

## 5 DEMANDE D'ENLEVEMENT

Un compte Starservice Healthcare doit être créé pour le service d'expédition de votre institution en contactant le [secretariat@auragen.fr](mailto:secretariat@auragen.fr) **avant toute première demande d'enlèvement.**

Nous enverrons à la personne référente de ce service un lien avec ses identifiants et mot de passe.



La demande d'enlèvement d'un colis s'effectue **au plus tard** la veille de l'envoi avant 19h sur l'extranet de Starservice Healthcare (<https://portail.tse-medical.net/colibri/>) pour un départ le lendemain dans la journée (9h-17h).

**Particularités (hors jours fériés) : Expédition du mardi au jeudi.**

- Pas de demande d'enlèvement le jeudi pour une expédition le vendredi
- **Demande d'enlèvement à réaliser du lundi au mercredi** pour un dernier départ du jeudi et une livraison le vendredi

Les colis sont à manipuler avec précaution.

**En cas de jours fériés, à voir au cas par cas.**

- Pas de demande d'enlèvement l'avant-veille du jour férié pour une expédition la veille du jour férié.

Echantillons constitutionnels et somatiques (sang et tissu) température -80°C (carboglace)	lundi	mardi	mercredi	jeudi	vendredi
Jour de demande d'enlèvement pour un départ le lendemain	Avant 19h	Avant 19h	Avant 19h	Pour un départ le mardi uniquement	Pour un départ le mardi uniquement
Jour d'expédition de Starservice Healthcare		9h-17h	9h-17h	9h-17h	
Jour de réception			oui	oui	oui

Pour contacter le secrétariat d'AURAGEN : 04 72 11 25 40 / 04 72 11 25 50 / [secretariat@auragen.fr](mailto:secretariat@auragen.fr)





**GCS AURAGEN**  
5 place d'Arsonval  
Bâtiment B7  
69003 LYON

**Consigne prélèvement KC  
métropole**

**ENR-Pré-002-07**  
Version : 7  
Applicable le : 31-05-2024



ANNEXE 1

 <b>GCS AURAGEN</b> 5 place d'Arsonval Bâtiment B7 69003 LYON	<b>Bordereau d'expédition - échantillons AURAGEN</b>	<b>ENR-Pré-058-01</b> Version : 1 Applicable le : 25-01-2023
		

**Merci de joindre une copie de ce tableau dans chaque colis et de conserver l'original**

N° de commande : \_\_\_\_\_

Date d'envoi : \_\_\_\_\_

Nom de la personne en charge de l'envoi : \_\_\_\_\_

Nombre total de tubes dans le colis : \_\_\_\_\_

Service expéditeur ou cachet du service :

Tableau récapitulatif des échantillons expédiés

Identification du patient (Etiquette patient ou laboratoire ou identifiant de l'échantillon)	N° demande AURAGEN (MR-xxxx, KC-xxxx ou OC-xxxx)	Nombre de tubes

Partie réservée au laboratoire AURAGEN

Réception conforme/non conforme

Date :

Pour contacter le secrétariat d'AURAGEN : 04 72 11 25 40 / 04 72 11 25 50 / [secretariat@auragen.fr](mailto:secretariat@auragen.fr)